

Para Enzyme



 **PARACELSO**
Hospitalarios

Para Enzyme Detergente Enzimático

Descripción: Solución jabonosa viscosa incolora, transparente y de olor ligero a lavanda.

Composición:

Tensioactivo aniónico, espesantes, estabilizantes, proteasas con actividad colateral de alfa amilasa, lipasa.

Propiedades y usos:

Nuestro detergente enzimático se presenta como una opción práctica, en comparación con detergentes comunes, además es un producto de alto rendimiento, teniendo una fórmula multienzimática que ofrece sinergia para remover y eliminar residuos orgánicos, reduciendo el tiempo y el esfuerzo para el retiro de los mismos. Presenta actividad de proteasas, con actividades colaterales de amilasa, lipasa, las mismas que remueven todos los materiales orgánicos más comunes que se pueden encontrar en los implementos quirúrgicos sobre todo de endoscopios, broncoscopios, material de goma o plástico, equipos de terapia respiratoria, cistoscopios, artroscopios, laparoscópicos. Es un producto ideal para el uso directo a temperatura ambiente, previa a la desinfección de alto nivel o esterilización. Se lo recomienda además para el lavado de lencería hospitalaria.

Dosificación:

15 ml de detergente por litro de agua, esperar al menos 1 minuto de contacto y enjuagar, de ser necesario se puede usar un cepillo para ayudar a retirar el material.

Efectos secundarios:

Las enzimas son proteínicas, puede provocar o inducir a la sensibilización y la aparición de reacciones alérgicas en personas ya sensibilizadas, cuidado especial con el contacto prolongado con piel y mucosas.

Incompatibilidades:

No mezclar el producto con blanqueadores, ácidos fuertes.

Conservación:

Mantener a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco. Mantener adecuadamente cerrado.

Especificaciones el producto:

Características	Método Utilizado	Especificaciones
Color	Sensorial	Incoloro
Olor	Sensorial	Ligero a lavanda
Impurezas visibles	Visible	Negativo
Densidad 25°C g/cc	Analítico	1.002 - 1.060

Parámetro	Valor de ref.	Método	Referencia
E. coli	0 ufc	USP 35	USP 35
A. niger	0 ufc	USP 35	USP 35
P. aeruginosa	0 ufc	USP 35	USP 35
S. aureus	0 ufc	USP 35	USP 35

Estabilidad:

El producto es adecuado por dos años luego de su fecha de elaboración

